

# Oxy9Wave Vet (オキシ ナイン ウェブ Vet)



## 動物専用の小型反射型センサーによる 尾根部での連続測定


- \*ICUや検査室で測定可能  
オペ室から在宅に至る様々な医療現場で測定できます
- \*口周りの手術など、術野を選ばず測定可能

## IOTを用いた簡便な遠隔管理

- \*VEMO Pulsと共通のアプリケーションを使用し、  
遠隔モニタリングとアラーム機能を有す


## ユーザーフレンドリー

- \*動物専用のアルゴリズムを搭載
- \*低還流、小動物対応のパルスオキシメーター
- \*リチウムイオン電池で、連続20時間の長時間測定
- \*測定ディスプレイが縦・横に自動回転
- \*SpO2、脈拍、還流強度、脈波形の多彩な表示機能

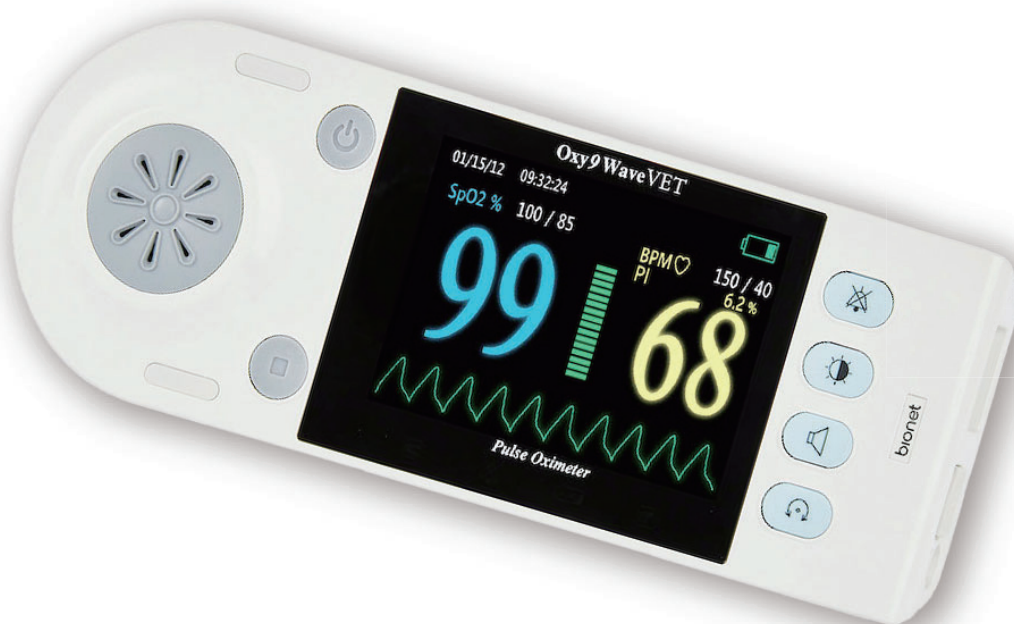

遠隔管理を可能にする2つのアプリケーション

- \*O'Pet Link Vue Oxy9Wave VetやVEMO PulsのデータをBluetoothでスマートデバイスに送信。
- \*O'Pet Station Vue スマートデバイスに送信されたデータをクラウドに送信。遠隔地においてリアルタイムで監視可能。

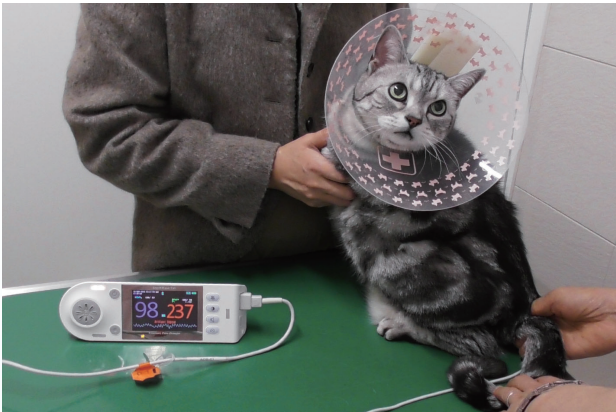

尾根部に取り付けた反射型センサーによるモニタリング

仕様

測定パラメータ

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| SpO <sub>2</sub> (血中酸素飽和度) | 測定範囲：40～100%<br>精度：70～100%の範囲で±2% |
| BPM (脈拍)                   | 測定範囲：18～450 bpm<br>精度：±2 bpm      |
| トレンドデータ                    | メモリ容量：10秒ごとの記録で30日分               |

ディスプレイ

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ディスプレイ     | 3.5インチ TFT LCD (解像度：320×480 pixel)                                                            |
| 表示パラメータと情報 | SpO <sub>2</sub> 、脈拍、SpO <sub>2</sub> および脈拍のアラーム上限・下限数値、脈波強度バーグラフ、脈波形、日時、アラーム音量、電池残量、ディスプレイ輝度 |
| LEDディスプレイ  | SpO <sub>2</sub> センサーの脱着、アラーム消音、充電ステータス、電源ステータス                                               |

電源

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 消費電力   | 最大 24 VA                                                      |
| ACアダプタ | 入力：100～240 V、50～60 Hz、0.4 A<br>出力：+5 V、2.0 A                  |
| 電源     | 内蔵型リチウムイオン電池 (4,400 mAh、3.7 V)<br>連続使用時間：最長20時間<br>充電時間：6.5時間 |

環境仕様

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 使用環境温度 | 5℃～40℃            |
| 保管環境温度 | －20℃～70℃          |
| 環境湿度   | 5%～95%            |
| 使用環境高度 | －300～3,600 m      |
| 重量     | 300 g             |
| 製品寸法   | 高さ45×幅217×奥行75 mm |

製品・アクセサリ

|         | 品番            | 品名                                              | 規格     | 入数   |
|---------|---------------|-------------------------------------------------|--------|------|
| 本体(セット) | 110334-4000   | オキシ ナイン ウェブ Vet<br>(本体、Yセンサー、ACアダプタ、ポール装着ブラケット) |        | 1個   |
| アクセサリ   | 152600-032410 | オキシナイン用反射型直腸 S p O 2 センサー                       | 10feet | 1個/袋 |
|         | 152600-003351 | オキシナイン用Yセンサー                                    | 3m     | 1個/袋 |

一般的名称:パルスオキシメータ 販売名:動物用パルスオキシメーター Oxy9Wave Vet 動物用医療機器届出番号:5動薬第1279号 クラスI(一般医療機器)