



ErogoSys ~ Ergonomic, Economic, and Precose ~

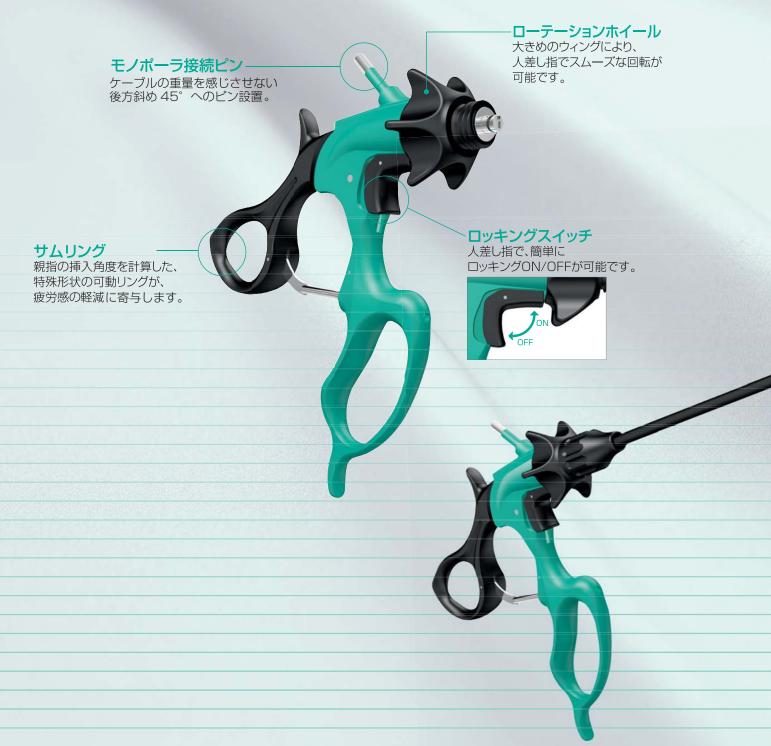

Lock anywhere you want.「どこでもロック」

どこでもロック

ロッキングポジションが決められたタイプ

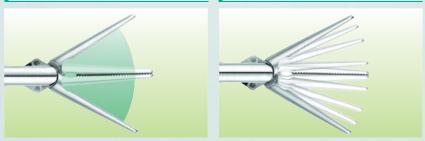


ジョーの開閉範囲内の、どの位置でもロックできるので、組織に対して絶妙な圧加減が可能です。

■組み立て方法はハンドル+シース・



電極の凹部とシースの凸部を スナップアクションで連結します。

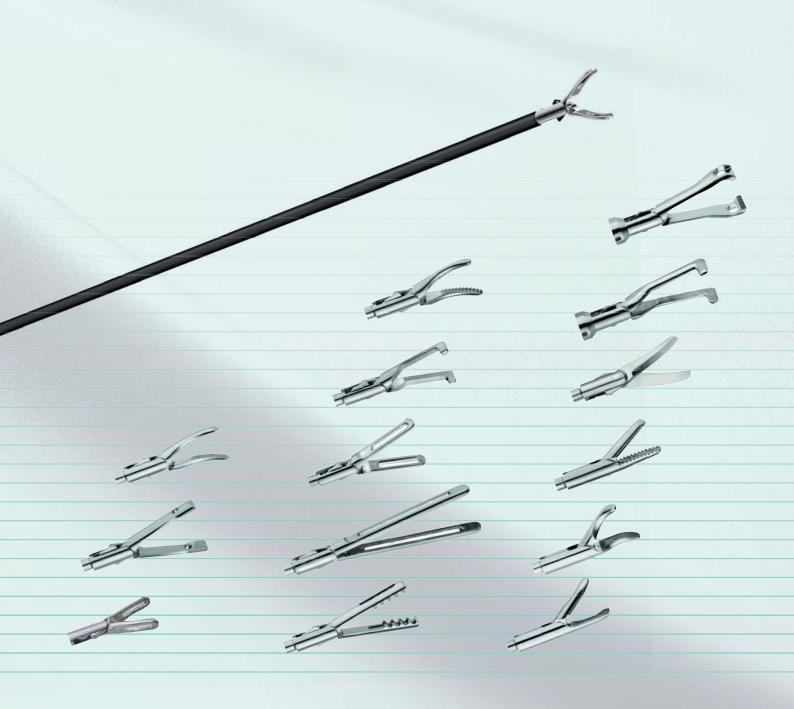

ス+電極の3パーツ簡単組み立て構造です。 ▼疲れにくい「エルゴハンドル」



ハンドルを開いた状態で、シースのボールジョイントをハンドルに連結します。 ローテータの白点を12時の位置に回して、ハンドルを閉じます。 ハンドルを閉じた状態でシースコネクタを時計まわりに回し、固定します。





ハンドルに設置した2点のストッパーで、握る手のポジションも自在です


ハンドル



品番	品 名	規格
1292-30-00	エルゴ ハンドル	ロックなし
1292-30-10	エルゴ ハンドル	ロックつき
1292-20-30	持針器用ストレートハンドル	ロックつき

販売名: パユンクErgoSys 医療機器認証番号: 226ADBZX00064000 クラスII

シース

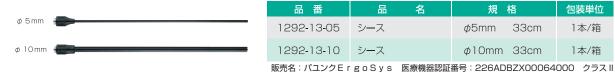

φ10mm 電極

•	品 番	品 名	規格	包装単位
9	1292-83-10	バブコック把持鉗子	ジョ ー 長さ 30mm ø10mm 33cm	1本/箱
	1292-63-21	ミクスター剥離鉗子	ジョ ー 長さ 30mm ø10mm 33cm	1本/箱

販売名: パユンクErgoSys 医療機器認証番号: 226ADBZX00064000 クラス II

φ5mm 電極

品 番	品 名	規	格	包装単位
1292-93-14	メッツェンバウム剪刃	ジョ ー 長さ 17mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-95-10	持針器 直	ジョー長さ 12mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-95-11	持針器 レフトカーブ	ジョー長さ 12mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-95-12	持針器 ライトカーブ	ジョー長さ 12mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-53-20	メリーランド剥離鉗子	ジョ ー 長さ 17mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-53-21	ミクスター剥離鉗子	ジョー長さ 20mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-53-37	有窓把持鉗子	ジョ ー 長さ 20mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-53-38	有窓把持鉗子 ロング	ジョ ー 長さ 40mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-53-39	有窓ウェーブ把持鉗子	ジョ ー 長さ 22mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-53-42	ケリー剥離鉗子	ジョー長さ 17mm	φ5mm 33cm	1本/箱
1292-53-26	バブコック把持鉗子	ジョー長さ 22mm	φ5mm 33cm	1本/箱
	販売名:パユンクE	rgoSys 医療機器認言	正番号:226ADBZX00064	000 クラスⅡ

φ3mm 電極

	品番	品 名	規格	包装単位
	1292-42-24	有窓把持鉗子	ジョー長さ 10mm	1本/箱

販売名: パユンクErgoSys 医療機器認証番号: 226ADBZX00064000 クラスII

アクセサリー

 品番
 品名
 規格
 包装単位

 1292-43-98
 洗浄用ルアロックアダプター
 ー
 1個/箱

法第二条第四項適用外

製造販売元

本

代理店

少JSS 株式会社ジェイ エス エス

http://www.jssco.co.jp/

社 : 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階

TEL 06-6222-3751 FAX 06-6222-3750

東京営業所: TEL 03-5363-8470 FAX 03-5363-8475

福岡営業所: TEL 092-436-9831 FAX 092-436-9832

