

# POWERGRIP 5.0



# POWERGRIP 3.0 micro

ジョーの開閉をアクティブに

パワーグリップ バイポーラ凝固鉗子

Bipolar Coagulation Forceps




JSS 株式会社ジェイ エス エス

# POWERGRIP 5.0 & 3.0 micro

Bissingerのパワーグリップは低侵襲手術で把持、剥離、切離に使用するバイポーラ凝固用鉗子です。

パワーグリップ 3.0 マイクロは従来のパワーグリップの強い把持力を活かしたまま、細径化し開発された3.0mm径のバイポーラ鉗子です。また、シャフトは屈曲“flexing”に耐えられるよう設計されました。  
- Bissinger Medizintechnik

- バイポーラ把持鉗子（シザーズ電極も有）
- 3パーツ構成により洗浄やメンテナンスが簡単
- 手技に合わせて電極の選択が可能
- パワーグリップマイクロのハンドルはフォースリミッター機能付き

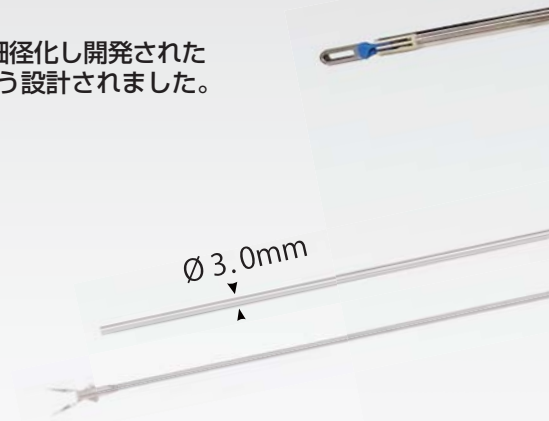

## パワーグリップの各種電極

■絶縁皮膜 絶縁皮膜が先端近くまで施されており、周辺組織への損傷リスクを低減。




## パワーグリップマイクロの各種電極





## 組み立て手順 (製品共通)

ジョー

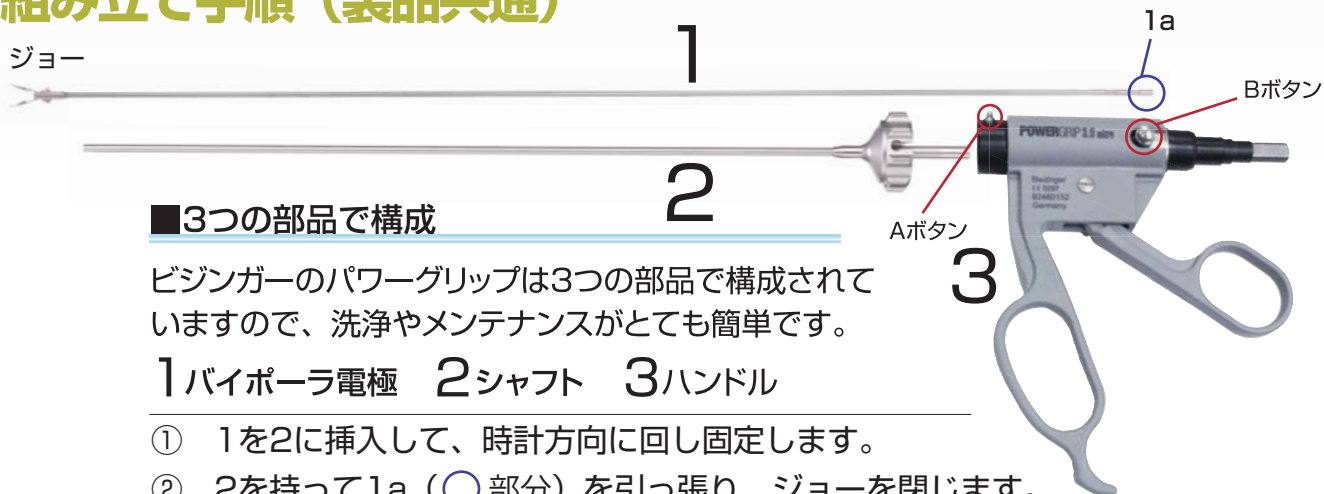

### ■3つの部品で構成

ビジナーのパワーグリップは3つの部品で構成されていますので、洗浄やメンテナンスがとても簡単です。

1バイポーラ電極 2シャフト 3ハンドル

- ① 1を2に挿入して、時計方向に回し固定します。
- ② 2を持って1a (○部分) を引っ張り、ジョーを閉じます。
- ③ Bボタンを押しながらAボタンの溝にあわせて2を差し込みます。
- ④ ハンドルを開くと「カッ」と音が鳴るので、装着完了となります。



### ■パワーKローテーター シャフトの回転がさらにスムーズに

■装着方法 パワーKローテーターの丸い窪みと器具本体のローテーターの突起部分を必ず合わせて装着して下さい。



パワーグリッパ		規格	品番
■ハンドル 1個/箱			82410001
■シャフト 1個/箱		34cm	82410034
		20cm	82410020
■オルビタリスハンドル 1個/箱			82460000
■オルビタリス シャフト 1個/箱		34cm	82460034
		20cm	82460020
■メリーランド 1個/箱		34cm	82400019
		20cm	82400429
■シザーズ 1個/箱		34cm	82400018
		20cm	82400428
■有窓把持鉗子 1個/箱		34cm	82400010
		20cm	82400411
■有窓メリーランド 1個/箱		34cm	82400015
		20cm	82400425
■マイクロフランス 1個/箱		34cm	82400014
■ピンポイント凝固鉗子 1個/箱		34cm	82400011

販売名: bissing erハイポラ電極  
医療機器認証番号: 224ACBZX00025000 クラスII

パワーグリッパ マイクロ		規格	品番
■ハンドル 1個/箱			82460152
■シャフト 1個/箱		29cm	82460202
		20cm	82460204
■メリーランド 1個/箱		29cm	82460302
		20cm	82460322
■シザーズ 1個/箱		29cm	82460324
		20cm	82460314
■有窓把持鉗子 1個/箱		29cm	82460300
		20cm	82460320

販売名: bissing erハイポラ電極  
医療機器認証番号: 224ACBZX00025000 クラスII

■パワーローテーター 1個/バック		PGR-01
----------------------	--	--------

法第二条第四項適用外

## バイポーラケーブル

電気メス側	ピン幅	品番	ケーブル長	器械側	包装単位
■BOWA, Valleylab, Conmed, Erbe等 	29mm	80100021	3m	ストレート	1本/バック
■BOWA, Valleylab, Conmed, Erbe等 	29mm	80100046	3m	アングル	
■Erbe等 	22mm	80100050	3m	ストレート	
■Erbe等 	22mm	80100061	3m	アングル	
■マーチン、ベルヒトール、ウルフ、ビジンガー エースクラブ GK55, GK60 		80100019	3m	ストレート	

販売名: Bissing erアクセサリ 医療機器届出番号: 27B1X00040000148 クラスI

製造販売元

代理店

**JSS 株式会社ジェイ エス エス**

<http://www.jssco.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 北浜MIDビル14階

TEL 06-6222-3751 ・ FAX 06-6222-3750

東京営業所: TEL 03-5363-8470 ・ FAX 03-5363-8475

大阪営業所: TEL 06-6222-3757 ・ FAX 06-6222-3756

福岡営業所: TEL 092-436-9831 ・ FAX 092-436-9832



JSS公式のユーチューブチャンネル「JSSTV」では、医療従事者向けに臨床動画や製品紹介動画を配信!! 動画をご覧いただくには、当社HPの動画ページを経由することで閲覧いただけます。是非ご覧ください!! 「チャンネル登録」もお忘れなく。



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

B510007-2108-02-1000-005