

POWERGRIP 5.0




POWERGRIP 3.0 micro

ジョーの開閉をアクティブに

パワーグリップ バイポーラ凝固鉗子

Bipolar Coagulation Forceps

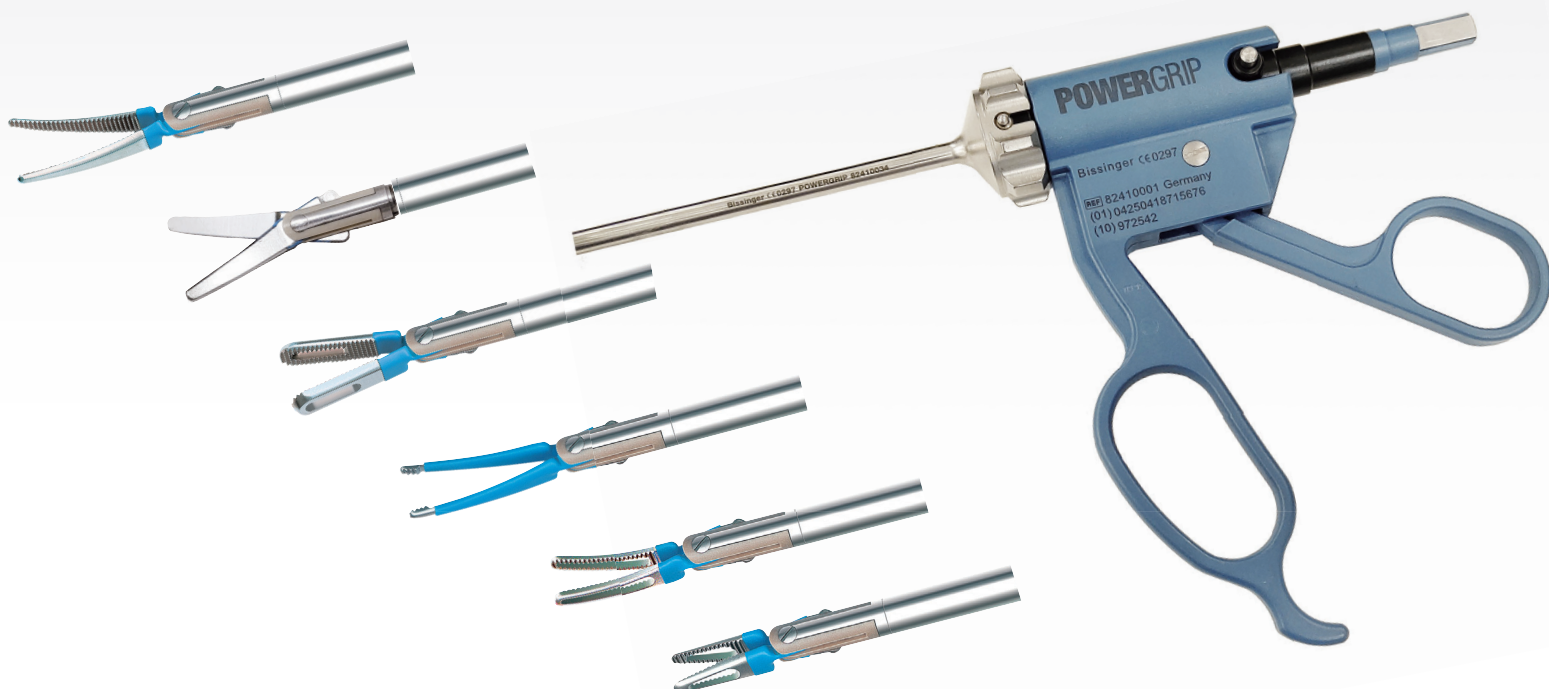

POWERGRIP 5.0 & 3.0 micro

Bissingerのパワーグリップは低侵襲手術で把持、剥離、切離に使用するバイポーラ凝固用鉗子です。

パワーグリップ 3.0 マイクロは従来のパワーグリップの強い把持力を活かしたまま、細径化し開発された3.0mm径のバイポーラ鉗子です。また、シャフトは屈曲“flexing”に耐えられるよう設計されました。
- Bissinger Medizintechnik

- バイポーラ把持鉗子（シザーズ電極も有）
- 3パーツ構成により洗浄やメンテナンスが簡単
- 手技に合わせて電極の選択が可能
- パワーグリップマイクロのハンドルはフォースリミッター機能付き




パワーグリップの各種電極

■ **絶縁皮膜** 絶縁皮膜が先端近くまで施されており、周辺組織への損傷リスクを低減。



パワーグリップマイクロの各種電極



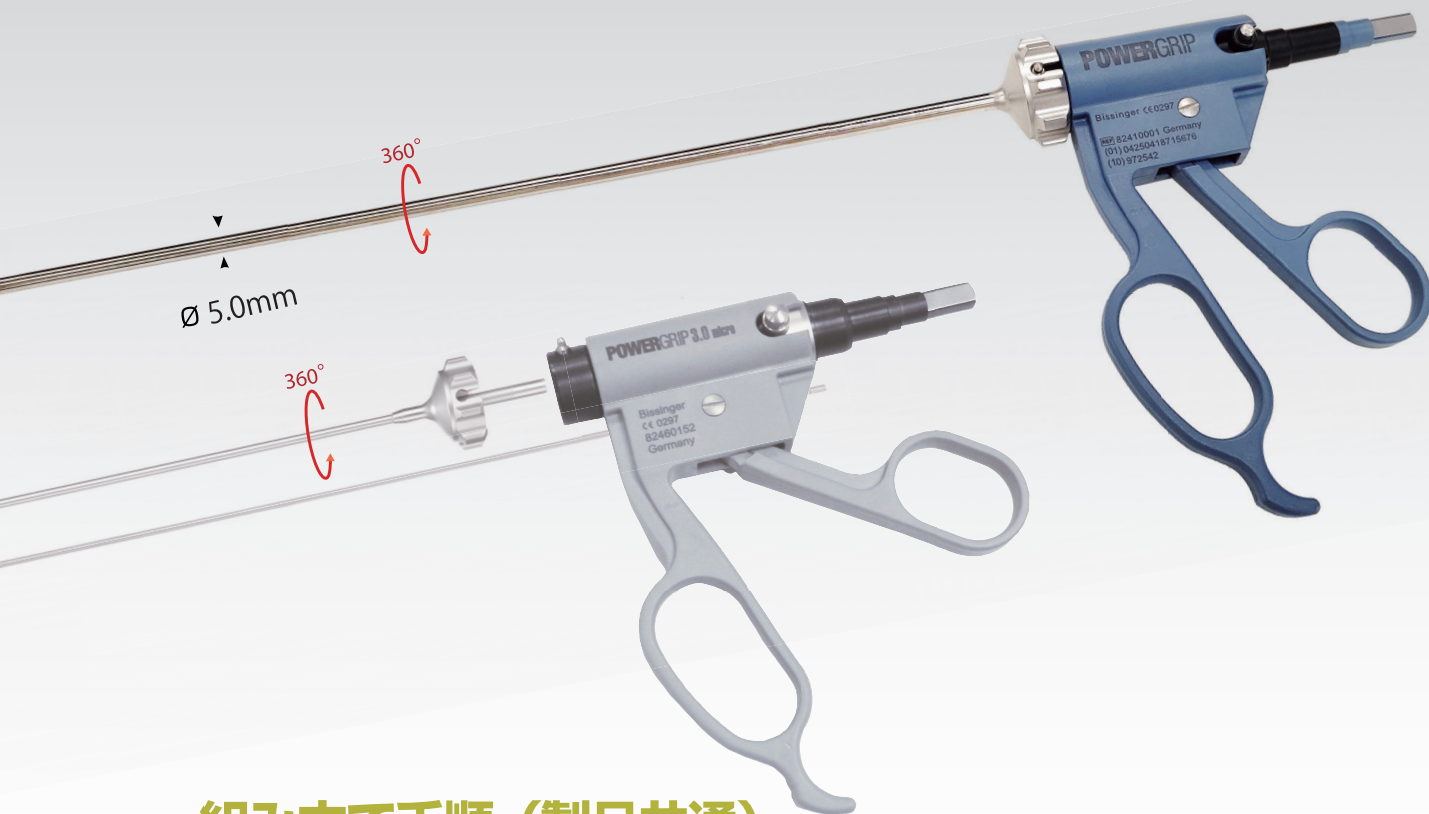

組み立て手順（製品共通）

ジョー



1

2

3

■3つの部品で構成

ビジナーのパワーグリップは3つの部品で構成されていますので、洗浄やメンテナンスがとても簡単です。

1 バイポーラ電極 2 シャフト 3 ハンドル



- ① 1を2に挿入して、時計方向に回し固定します。
- ② 2を持って1a（○部分）を引っ張り、ジョーを閉じます。
- ③ Bボタンを押しながらAボタンの溝にあわせて2を差し込みます。
- ④ ハンドルを開くと「ガッ」と音が鳴るので、装着完了となります。




■パワー K ローテーター シャフトの回転がさらにスムーズに

■装着方法 パワーKローテーターの丸い窪みと器具本体のローテーターの突起部分を必ず合わせて装着して下さい。

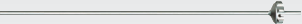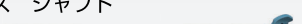

パワーグリップ		規格	品番
■ハンドル 1個/箱			82410001
■シャフト 1個/箱		34cm	82410034
		20cm	82410020
■オルビタリス ハンドル 1個/箱			82460000
■オルビタリス シャフト 1個/箱		34cm	82460034
■メリーランド 1個/箱		34cm	82400019
		20cm	82400429
■シザーズ 1個/箱		34cm	82400018
		20cm	82400428
■有窓把持鉗子 1個/箱		34cm	82400010
		20cm	82400411
■有窓メリーランド 1個/箱		34cm	82400015
		20cm	82400425
■マイクロフランス 1個/箱		34cm	82400014
■ピンポイント凝固鉗子 1個/箱		34cm	82400011

一般的名称:バイポーラ電極 販売名:bissinger/バイポーラ電極
医療機器認証番号:224ACBZX00025000 クラスII

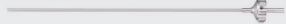パワーグリップ マイクロ		規格	品番
■ハンドル 1個/箱			82460152
■シャフト 1個/箱		29cm	82460202
		20cm	82460204
■メリーランド 1個/箱		29cm	82460302
		20cm	82460322
■シザーズ 1個/箱		29cm	82460324
		20cm	82460314
■有窓把持鉗子 1個/箱		29cm	82460300
		20cm	82460320

一般的名称:バイポーラ電極 販売名:bissinger/バイポーラ電極
医療機器認証番号:224ACBZX00025000 クラスII

■パワーローテーター 1個/袋			PGR-01
--------------------	--	---	--------

法第二条第四項適用外

バイポーラケーブル

電気メス側	ピン幅	品 番	ケーブル長	器械側	包装単位
■BOWA, Valleylab, Conmed, Erbe等	 29mm	80100021	3m	 ストレート	1本/袋
■BOWA, Valleylab, Conmed, Erbe等	 29mm	80100046	3m	 アングル	
■Erbe等	 22mm	80100050	3m	 ストレート	
■Erbe等	 22mm	80100061	3m	 アングル	
■マーチン, ベルヒートル, ウルフ, ビジンガー エースクラブ GK55, GK60	 22mm	80100019	3m	 ストレート	

一般的名称:電気手術器用ケーブル及びスイッチ 販売名:Bissingerアクセサリ 医療機器届出番号:27B1X00040000148 クラスI

製造販売元

代理店

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本 社：〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F

TEL 06-6222-3751 ・ FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470 ・ FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757 ・ FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831 ・ FAX 092-436-9832



JSS公式のユーチューブチャンネル「JSS TV」では、医療従事者向けに臨床動画や製品紹介動画を配信！！動画をご覧いただくには、当社HPの動画ページを経由することで閲覧いただけます。是非ご覧ください！！「チャンネル登録」もお忘れなく。



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

B5100007-2309-04-500-17