

JSS リムホルダー 16本入り (12500J) 取扱説明書


法第二条第四項適用外

≪ 結び方 参考例 ≫

①



②

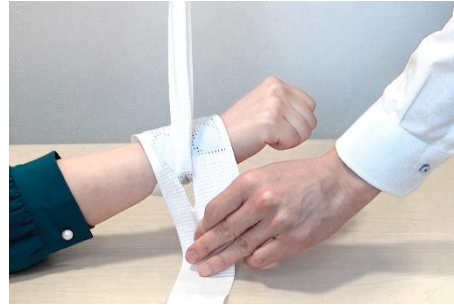

- ① リムホルダーのパッドの青い面を上にし、“通し穴”が患者の外側になるように患者の手（足）首にのせる

- ② 患者の内側の紐を“通し穴”に通す
※ 手首が細くてフィットしない場合はパッド部分も“通し穴”に入れる

- ③ 同じ紐をもう一周し再度“通し穴”に通す

- ④ もう片方の紐を内（下）向きに一周させる

- ⑤ 2本の紐が大体同じ長さになるように調整する

- ⑥ 手首の外側で固結びする
※ 強く締めすぎないようにする
結び目と手首の間に指一本程（1～2cm）の余裕をもたせる

- ⑦ 紐の先を適切な場所（ベッド、車いす等）に固定する

③




④



⑤



⑥

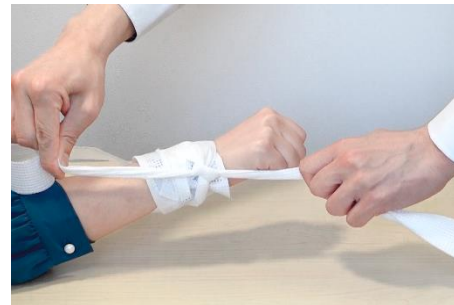

材質：ポリエステル不織布、ポリエステルフォーム 入数：16本/箱
破断荷重（リムホルダーを引っ張って切れた時の荷重）：1重 58kg 2重 113kg

販売元

 **JSS 株式会社ジェイエスエス**

<https://jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号JMFビル北浜01 14F
TEL.06-6222-3751 FAX.06-6222-3750

東京営業所：TEL.03-5363-8470 FAX.03-5363-8475

大阪営業所：TEL.06-6222-3757 FAX.06-6222-3756

福岡営業所：TEL.092-436-9831 FAX.092-436-9832

結び方動画



JDJH020