

内視鏡処置用縫合器

Port ClosOR PRO™

ポートクローザー




The smart way to close surgical incisions.

閉創デバイスにトロッカー内腔清拭用のスワブが
2本も付いてさらに便利に


Port ClosOR PRO™

ポートクローザー


② プランジャーの矢印が先端フックの開口側を示します

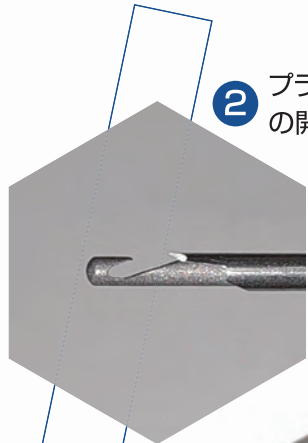

①

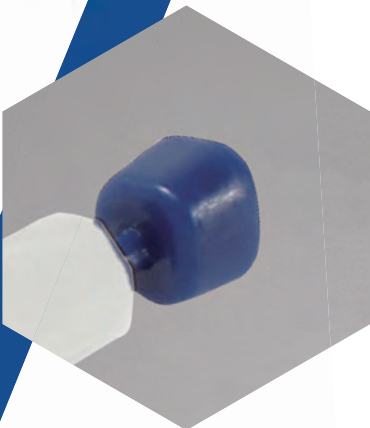

③

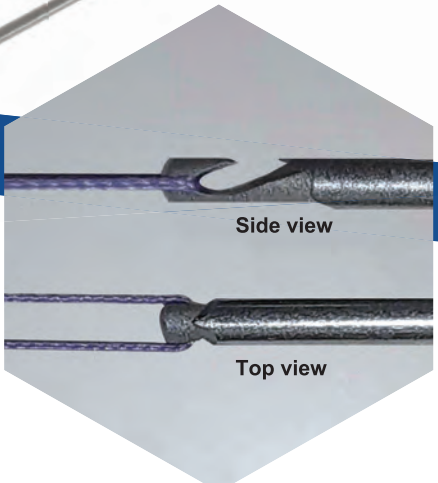

Side view

Top view

Port ClosOR PRO™ 操作手順

- ① 青色のプランジャーを押す
- ② 突出する先端フックに縫合糸を引っ掛ける
- ③ プランジャーをリリースすると縫合糸を把持できます

■ 5~8mmおよび10~12mmトロッカーの内腔清拭用スワブを同封(フォームはポリウレタン製)



トロッカーヘッドからスワブを挿入



カニューレ内腔を清拭

品名	品番	規格	包装単位
ポートクローザー	PC-120	15cm 14G	10個/箱

一般的名称:内視鏡処置用縫合器 販売名:アスペン ポートクローザー 医療機器届出番号:27B1X00040000235 クラスI
 一般的名称:単回使用トロカールスリーブ 販売名:ユニマックス トロッカーシステム 医療機器認証番号:228AHBZX00046000 クラスII

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL 06-6222-3751・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475
 大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756
 福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
 ●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

