

exofin[®]

TOPICAL SKIN ADHESIVE

皮膚用接着剤



exofin[®]は、速乾性に優れた2-オクチルシアノアクリレート系皮膚用接着剤です。液だれを抑え、狭い部位や不均一な皮膚面にも使用できます。柔軟な applicator と透明チップにより、スムーズに塗布できます。

エクソフィン マイクロ

exofin Micro

容量0.5mLで使いやすいチューブタイプ。

最長14日間
持続する
抗菌バリア※



exofin 使用方法

TOPICAL SKIN ADHESIVE

- 01 STEP 創部を清潔にし、十分に乾燥させたらうで、創縁を寄せてください。
- 02 STEP アプリケーターチップをひねるとチューブ内の膜が開き、接着剤が使用可能になります。
- 03 STEP 接着剤を創部に均一に塗布してください。




エクソフィン プレシジョン ペン


exofin Precision Pen

ガラスフリーで使いやすいペン型 applicator。


最長14日間
持続する
抗菌バリア※

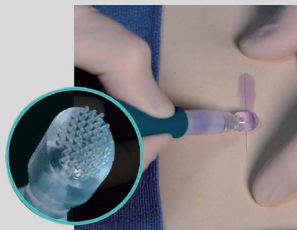

マイクロブラシチップ
広範囲の塗布に対応

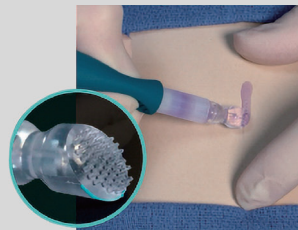

インバーテッドチップ
細かい塗布に便利

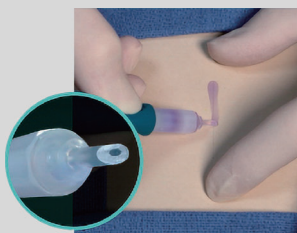

アングルドチップ
狭い場所でも使いやすい

3種の塗布方法に対応した
先端チップにより、様々な創部への
スムーズな塗布が可能です。

品番	品名	規格	包装単位
EX91510	エクソフィン マイクロ	0.5g	10本/箱
EP72412	エクソフィン プレシジョン ペン	1.0g	12本/箱

一般的名称: 皮膚用接着剤 販売名: エクソフィン 医療機器届出番号: 27B1X00040000238 クラスI

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL 06-6222-3751 (代)・FAX 06-6222-3750

東京営業所: TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所: TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所: TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

※参考文献

Pannu C.D. (2024). An in Vitro Evaluation of the 14-Day Microbial Barrier Property of Exofin High Viscosity Topical Skin Adhesive. Surgical Infections, 25(8), 564-573. DOI: 10.1089/sur.2024.036