


Mediflex[®]

SureGrip[™]

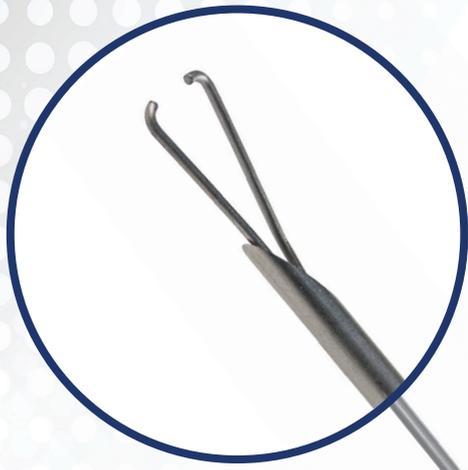

スーチャーグラスパーがリングハンドルタイプへ進化し、
片手で操作しやすい、さらにシユアなグリップになって再登場！

Featuring Mediflex Suture Grasper Series



品番：D4001 スーチャーグラスパー シュアグリッ

穿孔抵抗が少ないシャープな先端を持つスーチャーグラスパーのスタンダードタイプ。縫合糸を掴みやすいジョーと片手で操作可能なリングハンドルの組み合わせ。




品番：D2001 スーチャーグラスパー セーフパス

シャープな先端で穿孔し、腹腔内へ到達すると鈍の先端が押し出され、臓器損傷のリスクの軽減をサポート。

品番：94415

品番：94420

品番：94425

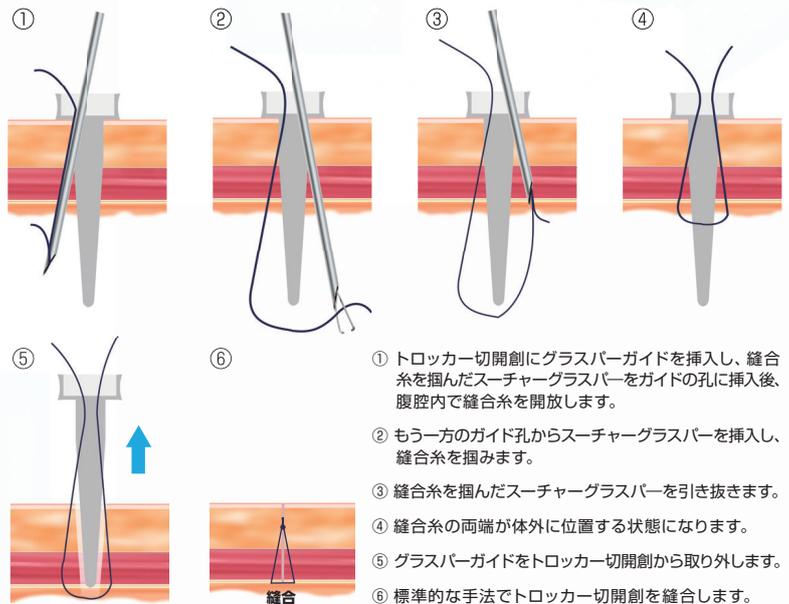

- ① トロッカー切開創にグラスパーガイドを挿入し、縫合糸を掴んだスーチャーグラスパーをガイドの孔に挿入後、腹腔内で縫合糸を開放します。
- ② もう一方のガイド孔からスーチャーグラスパーを挿入し、縫合糸を掴みます。
- ③ 縫合糸を掴んだスーチャーグラスパーを引き抜きます。
- ④ 縫合糸の両端が体外に位置する状態になります。
- ⑤ グラスパーガイドをトロッカー切開創から取り外します。
- ⑥ 標準的な手法でトロッカー切開創を縫合します。

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
スーチャーグラスパー シュアグリッ New	D4001	15cm 14G	5本/箱	※1
スーチャーグラスパー セーフパス	D2001	15cm 14G	10本/箱	※2
グラスパーガイド	94415	10-12mm 11.6cm	1本/箱	※3
	94420	10-12mm 9cm	1本/箱	※3
	94425	15mm 9.6cm	1本/箱	※3

※1 一般的名称：内視鏡処置用縫合器 販売名：メディフレックス スーチャーグラスパー-SG 医療機器届出番号：27B1X00040000239 クラスI
 ※2 一般的名称：単回使用縫合糸バサール 販売名：メディフレックス スーチャーグラスパー 医療機器認証番号：302ACBZX00037000 クラスII
 ※3 一般的名称：縫合糸バサー 販売名：メディフレックス グラスパーガイド 医療機器届出番号：27B1X00040000216 クラスI

製造販売元

代理店

JSS 株式会社ジェイ エス エス

本社：〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
 TEL 06-6222-3751(代)・FAX.06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475
 大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756
 福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
 ●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

MSG200901-2512-05-1000-04