


exofin[®]

TOPICAL SKIN ADHESIVE

皮膚用接着剤

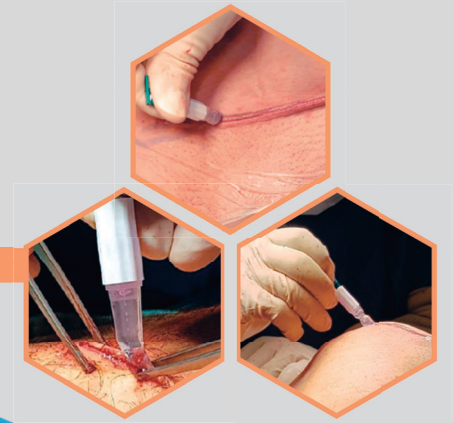

exofin[®]は、速乾性に優れた2-オクチルシアノアクリレート系皮膚用接着剤です。液だれを抑え、狭い部位や不均一な皮膚面にも使用できます。柔軟な applicator と透明チップにより、スムーズに塗布できます。

エクソフィン マイクロ

exofin Micro

容量0.5mLで使いやすいチューブタイプ。



exofin 使用方法

TOPICAL SKIN ADHESIVE


- 01 STEP** 創部を清潔にし、十分に乾燥させたうえで、創縁を寄せてください。
- 02 STEP** アプリケーターチップをひねるとチューブ内の膜が開き、接着剤が使用可能になります。
- 03 STEP** 接着剤を創部に均一に塗布してください。




エクソフィン プレシジョン ペン

exofin Precision Pen


ガラスフリーで使いやすいペン型 applicator。

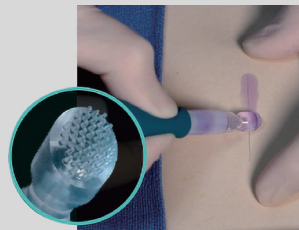

マイクロブラシチップ
広範囲の塗布に対応

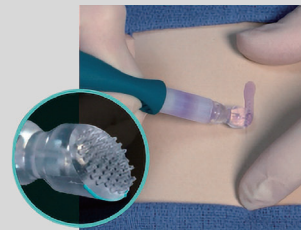

インバーテッドチップ
細かい塗布に便利

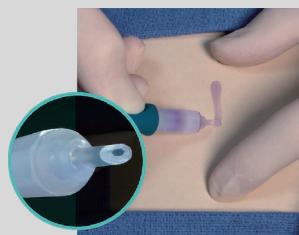

アングルドチップ
狭い場所でも使いやすい

3 種の塗布方法に対応した先端チップにより、様々な創部へのスムーズな塗布が可能です。

品番	品名	規格	包装単位
EX91510	エクソフィン マイクロ	0.5g	10本/箱
EP72412	エクソフィン プレシジョン ペン	1.0g	12本/箱

一般的名称: 皮膚用接着剤 販売名: エクソフィン 医療機器届出番号: 27B1X00040000238 クラスI

製造販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

<http://www.jssco.co.jp/>

本社: 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL 06-6222-3751 (代)・FAX 06-6222-3750

東京営業所: TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所: TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所: TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



●ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。

●ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

参考文献

Pannu C.D. (2024). An in Vitro Evaluation of the 14-Day Microbial Barrier Property of Exofin High Viscosity Topical Skin Adhesive. Surgical Infections, 25(8), 564-573. DOI: 10.1089/sur.2024.036