


Mediflex[®]

SURGICAL PRODUCTS

MADE IN

総合カタログ

Surgical Holders,
Positioning Arms, and
Laparoscopic Instruments

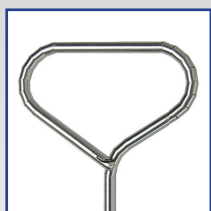

Surgical Holder & Positioning Arms

メディフレックス アームシステム

FlexArm™ Plus

レールクランプ組み込み型一体型システム



FlexArm™ Plus

ユニバーサルポストマウントシステム



StrongArm™



StrongArm™ BSS

Bronchoscope Stabilization System
気管支鏡保持システム



スコープ・レトラクターや内視鏡器具を保持し、ハンズフリーを提供する固定用アーム

- 調整に完全リセットの必要がないため、術中も調整が可能
- 人の腕と変わらない自由な位置決めが可能
- セットアップがシンプル
- オペチームの負担を軽減

StrongArm™

ストロングアーム

品番：73000
ストロングアームフロントマウント
レールクランプ付



品番：73000-SA
ストロングアームショートアーム
フロントマウントレールクランプ付



品番：73001-TM
ストロングアームトップマウント
レールクランプ無




品番：69099
品名：レールクランプ



ストロングアーム 箇所別寸法			
品番	73000	73000-SA / 73001-SA	73001-TM
A - B ポスト長 (調整範囲)	41cm (9-29cm)	41cm (9-29cm)	57cm (9-48cm)
B - C 中間部分	29cm	29cm	29cm
C - D 末端部分	32cm	20cm	32cm

※73001-SA及びTMはレールクランプ無

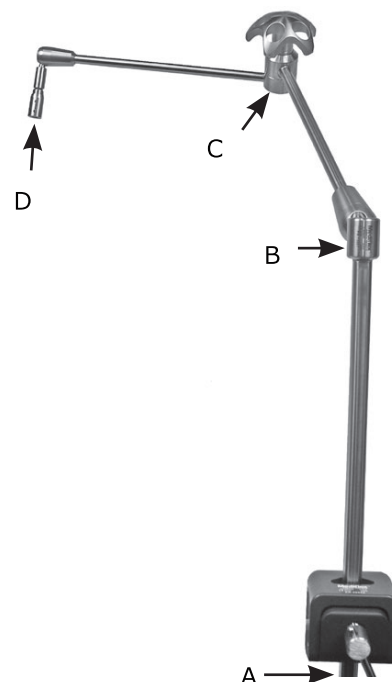

FlexArm™ Plus フレックスアーム

レールクランプ組み込み型一体型システム



品番 : 99045-QC
フレックスアームプラス

品番 : 99702
フレックスアームプラス ロング

ユニバーサルポストマウントシステム



品番 : 69098
ロングリーチポール


品番 : 99056-QC
フレックスアームプラスオンリー

品番 : 69099
品名 : レールクランプ

フレックスアーム プラス 一体型システム 箇所別寸法		
品番	99045-QC	99702
A - B ポスト長	27cm	27cm
B - C フレックス 部分	41cm	51cm

フレックスアーム プラス ポストマウントシステム 箇所別寸法		
品番	69098	99056-QC
A - B 調整範囲 (ポスト長)	5-42cm (45cm)	—
B - C 水平部 リーチ長	42cm	—
D - E フレックス 部分	—	42cm

BSS (Bronchoscope Stabilization System) 気管支鏡保持システム

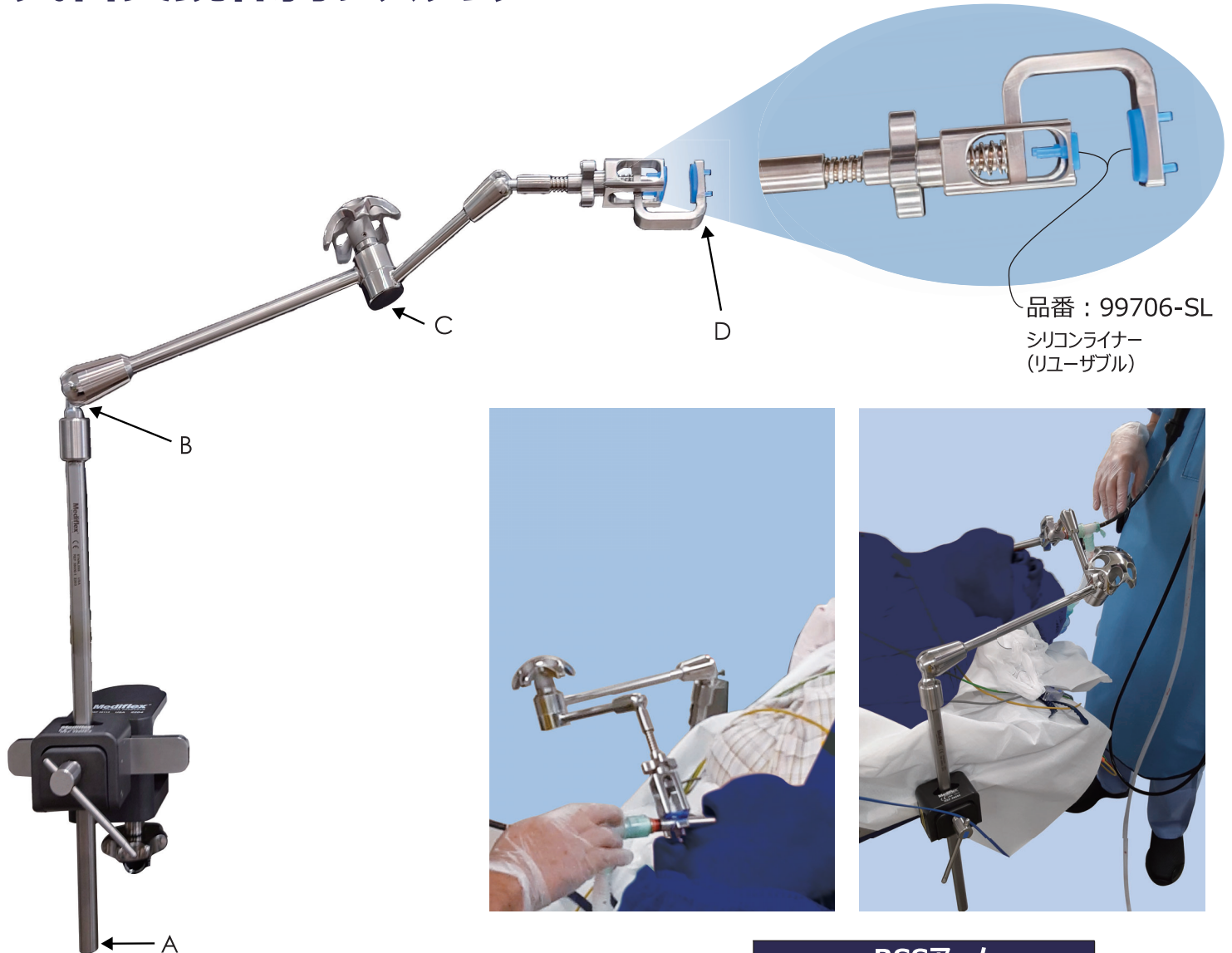

品番 : 38000

気管支鏡保持システム
トップマウントショートアームと固定BSSアタッチメントを
備えたレール クランプ 付Strong Arm™ です。

セットに含まれる製品

- ・レールクランプ (品番 : 69099)
- ・BSSストレージケース※ (品番 : 38100)

別売り

- ・シリコンライナー (品番 : 99706-SL)



※運搬用のキャリーケースで
滅菌ケースではありません。

BSSアーム 箇所別寸法

品番	38000
A - B ポスト長	44cm
B - C 中間部分	26cm
C - D 末端部分	29cm

メディフレックス アームシステム

ホルダ／ネイサンソン レバーフック/クランプ/滅菌ケース

ホルダ各種

Mediflexのフレックスアーム、ストロングアームはともに様々なデバイスをホールド可能で、いずれのアクセサリもアーム先端ヘワンタッチで接続できます。



UNLOCKED

LOCKED

LOCKED WITH
TIP INSERT

BSSアタッチメント

品番：99706
品名：B S S アタッチメントオンリー

品番：99706-SL
品名：シリコンライナー



クイックホルダ



品番：72162
品名：クイックグリップホルダ
10mm径



品番：72163
品名：クイックグリップホルダ
5mm径

広レンジホルダ



品番：69706
品名：ステンレスホルダ
3.5～15mm径




品番：69707
品名：デルリン樹脂ホルダ
1.5～15mm径

ラチェットアタッチメント



品番：69708
品名：ラチェットアタッチメント
レトラクタープレートに適合し、Mediflexの
アームシステムに取り付けることが可能

ネイサンソンレバーフック

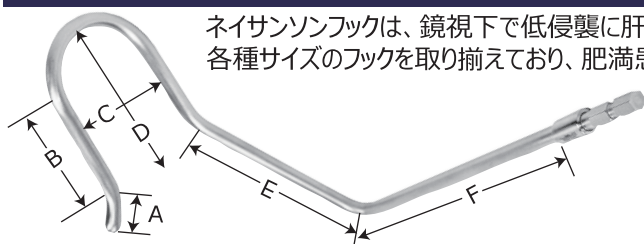

ネイサンソンフックは、鏡視下で低侵襲に肝臓の圧排を行うシステムです。
各種サイズのフックを取り揃えており、肥満患者から小児を含むすべての患者の手術に対応します。



ネイサンソン
挿入動画へ

品名	品番	径	サイズ	計測箇所					
				A	B	C	D	E	F
ネイサンソンレバーフック	69735-3	3.0mm	Small	1.3cm	3.8cm	4.1cm	5.8cm	8.9cm	14cm
	69738	5.0mm	Ex Small	1.3cm	2.3cm	2.3cm	4.6cm	5.1cm	14cm
	69703	5.0mm	Small	1.3cm	3.8cm	4.1cm	5.8cm	8.9cm	14cm
	69704	5.0mm	Medium	2.5cm	5.1cm	5.6cm	7.9cm	12.7cm	19.1cm
	69705	5.0mm	Large	3.8cm	7.6cm	7.6cm	11.4cm	17.8cm	27.2cm
	69736	6.5mm	Medium	2.5cm	5.1cm	5.6cm	7.9cm	12.7cm	19.6cm
	69737	6.5mm	Large	3.8cm	7.6cm	7.6cm	11.4cm	17.8cm	27.2cm
ロボティックネイサンソンレバーフック	69703-R9	5.0mm	Small	1.3cm	3.8cm	4.1cm	5.8cm	8.9cm	5.1cm
	69704-R9	5.0mm	Medium	2.5cm	5.1cm	5.6cm	7.9cm	12.7cm	5.1cm
	69705-R9	5.0mm	Large	3.8cm	7.6cm	7.6cm	11.4cm	17.8cm	5.1cm
	69736-XL-R9	6.5mm	Medium	4.3cm	5.1cm	5.6cm	7.9cm	12.7cm	5.1cm
	69736-XL-R12	6.5mm	Medium	4.3cm	5.1cm	5.6cm	7.9cm	12.7cm	8.1cm

クランプ/滅菌ケース



品番：38113
品名：レールエクステンション



品番：69099
品名：レールクランプ




品番：69760
品名：メディフレックスアーム用滅菌ケース


アームの組み合わせ例




デバイスホルド例

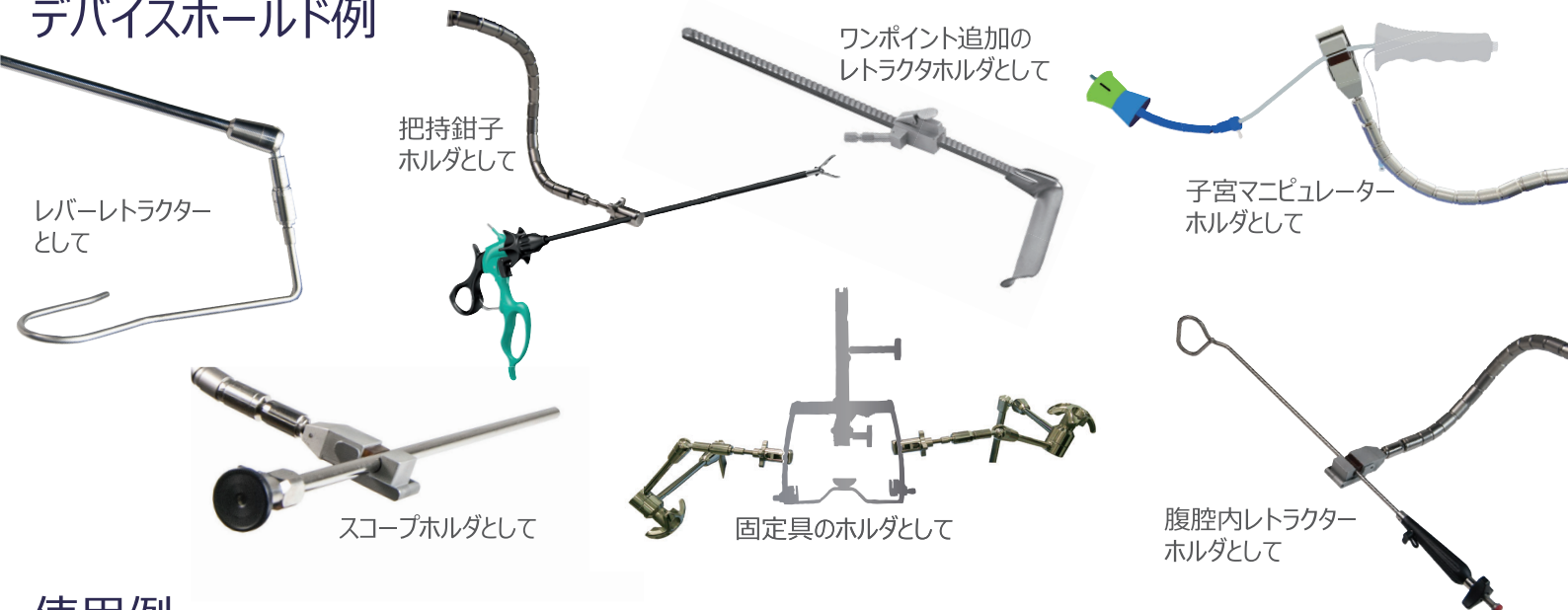


使用例

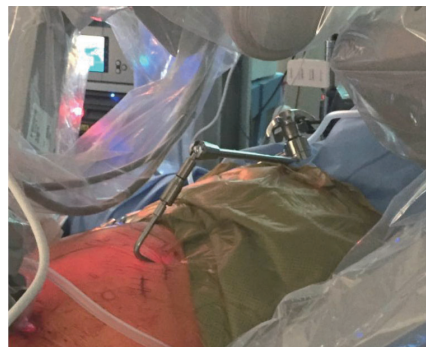

ロボットアームに干渉しない患者近くの目立たない位置に配置されたロボティクネイサンソンレバーフック
(シャフト長9cm)

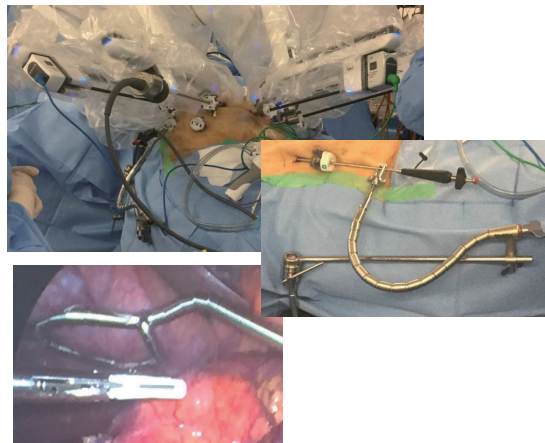

フレックスアームシステムとスネークレトラクターを使った肝臓挙上の一例

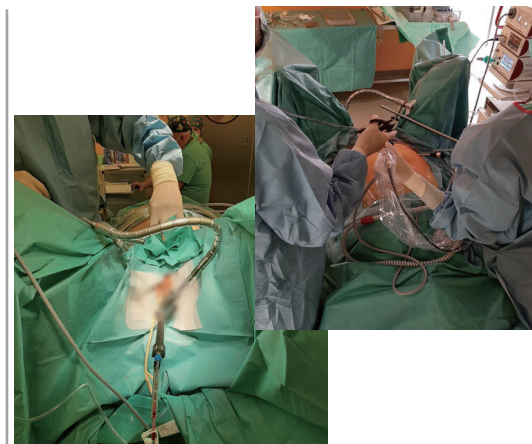

フレックスアームシステムとマニピュレーターホルダを組み合わせたセッティング例

Featuring Mediflex Suture Grasper Series



品番 : D4001 スーチャーグラスパー シュアグリップ

穿刺抵抗が少ないシャープな先端を持つスーチャーグラスパーのスタンダードタイプ。縫合糸を掴みやすいジョーと片手で操作可能なリングハンドルの組み合わせ。



品番 : D2001 スーチャーグラスパー セーフパス


シャープな先端で穿刺し、腹腔内へ到達すると鈍の先端が押し出され、臓器損傷のリスクの軽減をサポート。

グラスパーガイド

品番 : 94415

品番 : 94420

品番 : 94425

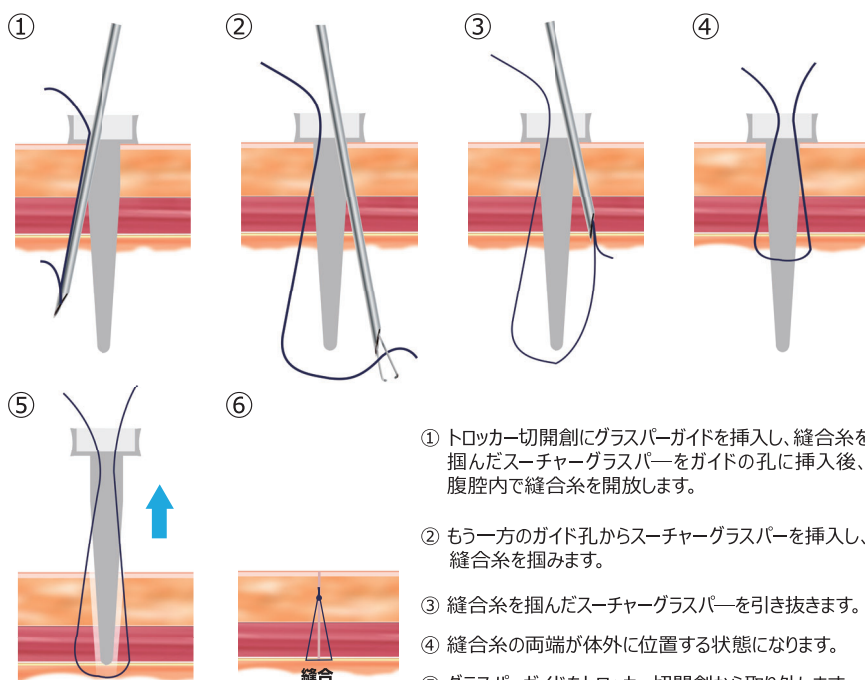

- ① トロッカー切開創にグラスパーガイドを挿入し、縫合糸を掴んだスーチャーグラスパーをガイドの孔に挿入後、腹腔内で縫合糸を開放します。
- ② もう一方のガイド孔からスーチャーグラスパーを挿入し、縫合糸を掴みます。
- ③ 縫合糸を掴んだスーチャーグラスパーを引き抜きます。
- ④ 縫合糸の両端が体外に位置する状態になります。
- ⑤ グラスパーガイドをトロッカー切開創から取り外します。
- ⑥ 標準的な手法でトロッカー切開創を縫合します。

配慮された孔の角度設計により、スーチャーの筋層への誘導をサポートします。

Cutting EdgeTM カuttingエッジ 内視鏡下手術用鉗子



- ディスポーザブル電極
- 軽量・リユーザブルのハンドル
- フラッシュポートにより洗浄が容易
- 絶縁処理されたシャフト

91383TI

ネジ山をで覆うことで組織接触による熱傷を防ぎます



鍵穴ボールとソケットによる接続デザインでネジ緩みによる脱落を防ぎます



**組み立て
簡単！**



91710-10



91730-10



91720-10



91740-10



91750-10

お求めやすいセットもございます。

商品名	商品CD	構成品	規格
カuttingエッジ メツエンバウムセット	HD91710-10-S	91383TI + 91710-10	ハンドル： 5mm 33cm チップ： 1.9cm
カuttingエッジ メツエンバウムセット	HD91730-10-S	91383TI + 91730-10	ハンドル： 5mm 33cm チップ： 1.25cmミ

メディフレックス ラパロ持針器

5mm
X
36cm



～手に収まるフィット感が良く、握りやすい軽量ハンドル～

Long Lasting 3-Part System

インサート

シャフト

ハンドル

3-Parts セット

ストレート (両手)
92021-I



レフトカーブ (右手)
92022-I



ライトカーブ (左手)
92023-I



シャフト
92020-S



ハンドル
92020-H



ストレート
92021

レフトカーブ
92022

ライトカーブ
92023

メディフレックス ラパロフレックスレトラクター

※洗浄・滅菌バリデーション取得済み (米国認定第三者機関)



フィンガー
品番 91680

4.5 cm

フラッシュポートを前方に設置する事で
内腔洗浄をより確実に出来るようになり、
操作ノブもより大きく操作し易くなりました。



アングルタイプ
先端側面図

5mm x 38cm

スネーク アングル (S)
品番 91682-A

6.0 cm



5mm x 32cm

スネーク アングル (L)
品番 91683-A

8.0 cm



5mm x 32cm



メディフレックス
アームシステムとの
組み合わせ使用例


スコープウォーマー

ディスポーザブルスコープ加温パック


～ 曇るスコープからの卒業 ～

術中におけるスコープの曇りを低減する術前加温ウォーマー

- 滅菌済みディスポーザブルパック
- 高額機器の導入が不要
- 簡単操作で1分以内に加温
- 化学反応で発熱するため電気・水が不要
- ロボット支援手術に適合
- レンズの損傷を防ぐ柔軟パック
- 様々なスコープサイズに適合
- 大きな収納スペース不要

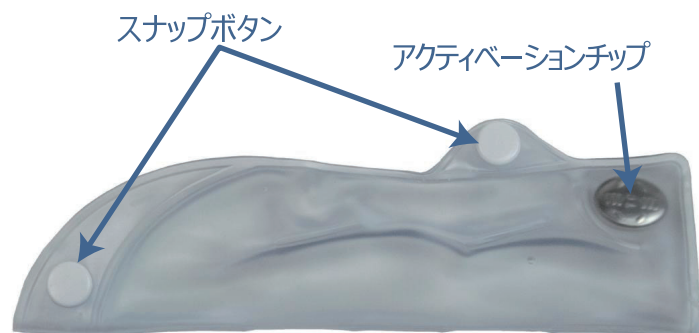

操作方法

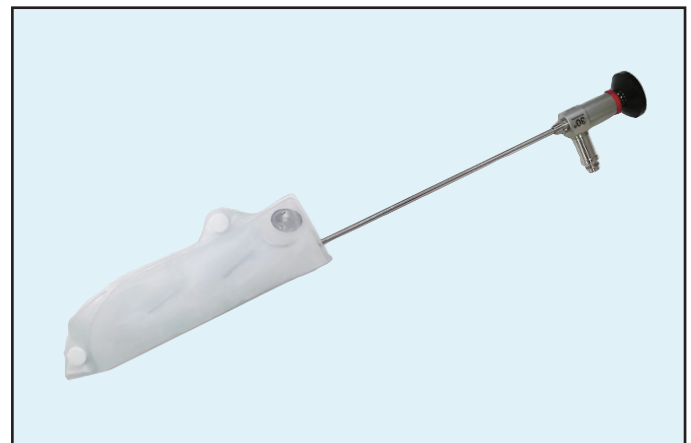

1) アクティベーションチップを音が鳴るまで数回押し曲げてください。液体が反応しましたら、全体が結晶化するまで待ちます。

2) スコープをウォーマーに挟み、スナップボタンを閉じ平らな場所に置いて数分加温してください。

SIMPLE • INEXPENSIVE • EFFECTIVE

Ordering information

Arm system

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
ストロングアーム レールクランプ付	73000	70°トマウント	1セット/箱	※1
ストロングアーム ショートアーム	73000-SA 73001-SA	70°トマウント 70°トマウント クランプ付	1セット/箱 1本/箱	※1
ストロングアーム	73001-TM	トップマウント	1本/箱	※1
フレックスアーム プラス	99045-QC	27cm 41cm	1本/箱	※1
フレックスアーム プラス ロング	99702	27cm 51cm	1本/箱	※1
フレックスアーム プラスオンリー	99056-QC		1本/箱	※1
ロングリーチボール	69098	45cm 42cm	1本/箱	※1
ネイサンソン レバーフック	69735-3	S 3mm	1本/箱	※1
	69738	XS 5mm	1本/箱	※1
	69703	S 5mm	1本/箱	※1
	69704	M 5mm	1本/箱	※1
	69705	L 5mm	1本/箱	※1
	69736	M 6.5mm	1本/箱	※1
	69737	L 6.5mm	1本/箱	※1
ロボティックネイサンソン レバーフック	69703-R9	S 5mm 9cm	1本/箱	※1
	69704-R9	M 5mm 9cm	1本/箱	※1
	69705-R9	L 5mm 9cm	1本/箱	※1
	69736-XL-R9	M 6.5mm 9cm	1本/箱	※1
	69736-XL-R12	M 6.5mm 12cm	1本/箱	※1
B S Sアーム レールクランプ付	38000	トップマウント	1セット/箱	※1

※1 一般的名称：内視鏡固定具 販売名：メディフレックス アームシステム 医療機器届出番号：27B1X00040000215 クラスⅠ

Arm system Holding Tips & Accessories

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
クイックグリップホルダ	72162	10mm	1個/箱	※1
	72163	5mm	1個/箱	※1
ステンレスホルダ	69706	3.5-15mm	1個/箱	※1
デルリン樹脂ホルダ	69707	1.5-15mm	1個/箱	※1
ラチェットアタッチメント	69708		1個/箱	※1
B S Sアタッチメントオンリー	99706		1個/箱	※1
シリコンライナー	99706-SL		4個/袋	※1
レールクランプ	69099		1個/箱	※1
レールエクステンション	38113	サイドレール5.7cm	1個/箱	※1
B S Sストレージケース	38100		1個/箱	※2
メディフレックスアーム用 滅菌ケース	69760	56x26x11cm	1個/箱	※2

※1 一般的名称：内視鏡固定具 販売名：メディフレックス アームシステム 医療機器届出番号：27B1X00040000215 クラスⅠ
※2 法第二条第四項適用外

Suture Grasper

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
スーチャーグラスパーシュアグリップ	D4001	15cm 14G	5本/箱	※1
スーチャーグラスパー セーフパス	D2001	15cm 14G	10本/箱	※2
グラスパーガイド	94415	10-12mm 11.6cm	1本/箱	※3
	94420	10-12mm 9cm	1本/箱	※3
	94425	15mm 9.6cm	1本/箱	※3

※1 一般的名称：内視鏡処置用縫合器 販売名：メディフレックス スーチャーグラスパー-SG 医療機器届出番号：27B1X00040000239 クラスⅠ
※2 一般的名称：単回使用縫合糸パサ 販売名：メディフレックス スーチャーグラスパー 医療機器認証番号：302ACBZX00037000 クラスⅡ
※3 一般的名称：縫合糸パサ 販売名：メディフレックス グラスパーガイド 医療機器届出番号：27B1X00040000216 クラスⅠ

Cutting Edge

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
カッティングエッジ ハンドル	91383TI	5mm 33cm	1個/箱	※1
	91383-45TI	5mm 45cm	1個/箱	※1
カッティングエッジ メツツェンバウム	91710-10	1.9cm	10個/箱	※1
	91720-10	1.6cm ストレート	10個/箱	※1
	91730-10	1.25cm ミニ	10個/箱	※1
	91740-10		10個/箱	※1
カッティングエッジ フック剪刀	91740-10		10個/箱	※1
カッティングエッジ メリーランド剥離鉗子	91750-10	1.9cm	10個/箱	※1
カッティングエッジ メツツェンバウムセット	HD91710-10-S	1.9cm	1セット/箱	※1
	HD91730-10-S	1.25cm ミニ	1セット/箱	※1

※1 一般的名称：再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 販売名：Mediflex 腹腔鏡手術機器 医療機器認証番号：224AFBZX00125000 クラスⅡ

Instrument

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
ラバロフレックス フィンガー	91680	5mm 38cm	1本/箱	※1
ラバロフレックス スネーク アングル	91682-A	S 5mm 32cm	1本/箱	※1
	91683-A	L 5mm 32cm	1本/箱	※1
ラバロモジュラー持針器 ハンドル	92020-H		1個/箱	※2
ラバロモジュラー持針器 シャフト	92020-S	5mm 36cm	1本/箱	※2
ラバロモジュラー持針器 ストレート	92021	5mm 36cm	1本/箱	※2
ラバロモジュラー持針器 インサート	92021-I	ストレート	1本/箱	※2
ラバロモジュラー持針器 レフトカーブ	92022	5mm 36cm	1本/箱	※2
ラバロモジュラー持針器 インサート	92022-I	レフトカーブ	1本/箱	※2
ラバロモジュラー持針器 ライトカーブ	92023	5mm 36cm	1本/箱	※2
ラバロモジュラー持針器 インサート	92023-I	ライトカーブ	1本/箱	※2

※1 一般的名称：開創器 販売名：ラバロフレックス レトラクター 医療機器届出番号：27B1X00040000213 クラスⅠ
※2 一般的名称：持針器 販売名：メディフレックス ラバロ持針器 医療機器届出番号：27B1X00040000214 クラスⅠ

Scope Warmer

品名	品番	規格	包装単位	薬事番号
スコープウォーマー	74005-20	18 x 5cm	20個/箱	※1

※1 法第二条第四項適用外

製造販売元

代理店



http://www.jssco.co.jp/

本社：〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番7号 JMFビル北浜01 14F
TEL 06-6222-3751代・FAX 06-6222-3750

東京営業所：TEL 03-5363-8470・FAX 03-5363-8475

大阪営業所：TEL 06-6222-3757・FAX 06-6222-3756

福岡営業所：TEL 092-436-9831・FAX 092-436-9832



JSS WEB



JSS TV

■ここに掲載した製品の仕様は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
■ここに掲載した製品の価格は、弊社の「価格表」をご覧ください。なお価格は、諸般の事情により予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

ME180831-2607-11-300-084